



Ficha técnica

DESCRIPCION: Lubricante personal líquido a base de agua que proporciona lubricación para mejorar el bienestar, la comodidad y la facilidad de la actividad íntima.

FRAGANCIA: Natural

INGREDIENTE: Water, glycerin, polyethylene glycol, cellulose gum, potassium sorbate, flavor, sucralose/
Agua, glicerina, polietilenglicol, goma de celulosa, sorbato de potasio, saborizante, sucralosa

PRESENTACIONES: Envase plástico de 89 ml líquido

FABRICANTE: Trigg Laboratories Inc.

IMPORTADOR: COSMONOVA COLOMBIA S.A.S

LINEA: Dispositivo medico

CARACTERISTICAS: TANGO a base de agua, transparente e inodoro, ligero, no graso, no deja manchas, es compatible con preservativos, pero no es un contraceptivo y no contiene espermicida.

Desarrollado para imitar los fluidos corporales naturales, la fórmula de Tango no solo lubrica, sino que también actúa como humectante para la sequedad vaginal.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, lejos de la acción directa del sol. Cerrar la botella cuidadosamente después del uso, no usar después de 3 meses de la apertura del envase. Ver fecha de caducidad en el estuche o en la base del envase.

INTRUCCIONES DE USO: Poner una gota sobre el dedo y aplicar en el área genital, uso dependiendo las necesidades individuales.

Durante el sexo vaginal, para incrementar la suavidad del encuentro, para el sexo anal, es que es recomendable usar lubricante en este tipo de práctica pues el ano no lubrica de forma natural y sin este aliado la experiencia puede ser molesta o dolorosa, en el sexo oral, así la suavidad que aportan hará que el placer de quien lo recibe sea mayor.

INFORMACION DE SEGURIDAD: Manténgase fuera del alcance de los niños, si observa una reacción desfavorable suspenda su uso, en caso de que persista consulte a su médico.

Usar con cuidado en personas con antecedentes de alergia.

No compre si el sello de seguridad estuviera abierto.

PRECAUCIONES Y ADVENTENCIAS: Evitar el contacto con los ojos, si se siente irritación, interrumpir su uso,

El lubricante vaginal puede reducir la movilidad del espermatozoides durante su aplicación, si hay interés en quedar embarazada, contactar al médico antes de usar el producto.

Si se necesita una lubricación adicional con excesiva frecuencia se aconseja consultar con el médico.

Mínimo riesgo para la lactancia y el lactante.

En general los geles lubricantes son materiales inertes y no alteran la fertilidad, si hay dudas sobre el uso debe consultar al médico.

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2019DM-0020263

